



Vendita, installazione e assistenza  
**AUSILI PER ANZIANI E DISABILI**

per info: **331 8482743**

[info@vebhomecomfort.it](mailto:info@vebhomecomfort.it)

## **Montascale MP-A**



Il modello MP-A è stato progettato per uso domestico.

- Alimentazione a corrente continua
- Controllo tipo joystick
- Display digitale di controllo
- Partenza e arresto "morbidi"
- Interruttore a chiave
- Poltroncina girevole
- Poggiapiedi e poltroncina pieghevoli
- Telecomandi a raggi infrarossi
- Sensori di sicurezza
- Doppio sistema di frenata (elettronico e meccanico)
- Silenzioso
- Facile da installare
- Fino a 125 kg di portata massima

### **Alimentazione**

Il montascale MP-A è alimentato a corrente continua tramite batterie ricaricabili che garantiscono un funzionamento ultrasilenzioso e sicuro. Le batterie non richiedono manutenzione e sono alimentate a 12 Volts AC tramite un trasformatore.

- Il montascale rimane operativo anche in caso di interruzione di corrente
- Nessuna alimentazione diretta sull'apparecchio.
- Nessun ingombrante cavo elettrico come quelli dei montascale a corrente alternata.
- Installazione rapida e semplice.
- Funzionamento silenzioso.
- Partenza e arresto "morbidi". Niente scatti bruschi in fase di partenza o di arresto.

## Qualità degli spostamenti

La qualità senza pari degli spostamenti deriva dal suo design unico, dall'uso di alimentazione a corrente continua e dal sistema a cremagliera. Tipicamente, altri montascale hanno quattro o al massimo sei rulli per lo scorrimento sulla rotaia. Il montascale MP-A ha invece otto rulli, pertanto la superficie di contatto è almeno quattro volte maggiore rispetto ai prodotti delle aziende concorrenti. Questo fattore combinato con una rotaia a doppio cilindro unica nel suo genere, garantisce il funzionamento più confortevole e silenzioso fra i montascale presenti sul mercato e un forte senso di sicurezza e stabilità.

## Sicurezza

Il montascale MP-A ha un impressionante numero di accessori di sicurezza di serie. Questi comprendono:

### **Sistema di frenata elettronico e meccanico**

Il montascale è dotato di questi sistemi al fine di eliminare ogni possibilità di discesa incontrollata.

### **Sensori di sicurezza**

Alla fine della corsa, il montascale si arresta morbidamente grazie a dei sensori che assicurano che il montascale si fermi sempre nella corretta posizione.

### **Tipo di controllo**



Il montascale MP-A può essere comandato tramite il joystick installato in uno dei braccioli o tramite telecomando a raggi infrarossi (ne sono forniti 2). L'uso del telecomando è ideale nel caso in cui vi siano due utenti e il montascale

debba essere chiamato ed eventualmente parcheggiato in cima o in fondo alla scala. Questo sistema consente di evitare l'installazione di ingombranti ed antiestetici box di controllo sul muro.

## **Cintura di sicurezza**



I montascale sono tutti dotati di cintura di sicurezza, per garantire una totale sicurezza di uso.

## **Poltroncina girevole**



La poltroncina del montascale può essere girata e fissata in una posizione in salire e scendere dal montascale con sicurezza e facilità. Il montascale non sarà operativo nel caso in cui la poltroncina non sia nella corretta posizione.

## **Bordi sensibili agli urti**



Il montascale è dotato di 5 bordi sensibili agli urti che fermano il montascale in caso di urto con un qualsiasi oggetto. I bordi si trovano sulla pedana poggiapiedi e alle estremità del carrello motore.

## Display digitale di controllo



Installato sul carrello motore si trova un display digitale di controllo, che indica quando il montascale funziona correttamente e che segnala eventuali guasti.

# Caratteristiche del Montascale

## Facile da installare

- **Pronto all'installazione** - ogni impianto è costruito, su misura per l'utente.
- **Niente cavi di troppo** - non vi è bisogno di modifiche costose all'impianto elettrico.
- **Funzionamento a batterie** - funzionamento a batterie che non richiedono manutenzione.
- **Telecomandi a raggi infrarossi**

## Facile da usare

- **Funzionamento silenzioso** - grazie al funzionamento a corrente continua, il rumore è ridotto al minimo.
- **Controllo tramite joystick o telecomandi.**
- **Partenza e arresto morbidi** - nessun movimento brusco né in fase di partenza né di arresto.
- **Poltroncina girevole** per garantirvi la massima comodità.
- **Display digitale di controllo** - situato al lato della poltroncina. Un sistema di spie che consente all'utente di verificare il corretto funzionamento dell'impianto.
- **Poltroncina e poggiapiedi pieghevoli** - La poltroncina, i braccioli e i poggiapiedi sono pieghevoli, pertanto l'ingombro è veramente ridotto al minimo quando l'impianto non è in uso.

## Uso sicuro

- **Costruito in conformità alle direttive CEE.**
- **Sensori antiurto fermano l'impianto in caso di urto lungo le scale**  
Questi sensori sono situati nel poggiapiedi e agli estremi del blocco contenente il motore.
- **Sensori di fine corsa:** assicurano che l'impianto si fermi nella corretta posizione ad ambe le estremità della guida.
- **Sistema di frenata elettronico e meccanico:** elimina la possibilità di una discesa incontrollata.
- **Interruttore a chiave.**
- **Funzionamento a corrente continua** - sicurezza e affidabilità assicurate; l'impianto funziona anche in caso di interruzione della corrente.

## Accessori per i montascale

Produciamo una varietà di accessori complementari al montascale. Questi accessori sono progettati e realizzati per fornire soluzioni il più confortevole possibili, per persone con ulteriori problemi di mobilità o per adattare il montascale a modelli di scale più complessi.

### Opzione seduto / in piedi




Questo accessorio permette all'utente di scegliere di scendere o salire le scale seduto o in piedi. E' dotato inoltre di una speciale barra di sicurezza. Ideale per coloro che hanno problemi alle articolazioni delle ginocchia o nel caso in cui diversi utenti dello stesso montascale presentino diversi livelli di disabilità motoria.

## Rotaia pieghevole



La parte inferiore della rotaia può essere sollevata verso l'alto, quando non in uso, per consentire un migliore accesso alla base delle scale: ad esempio, in presenza di una porta alla base delle scale.

## Montascale MP-A dettagli tecnici

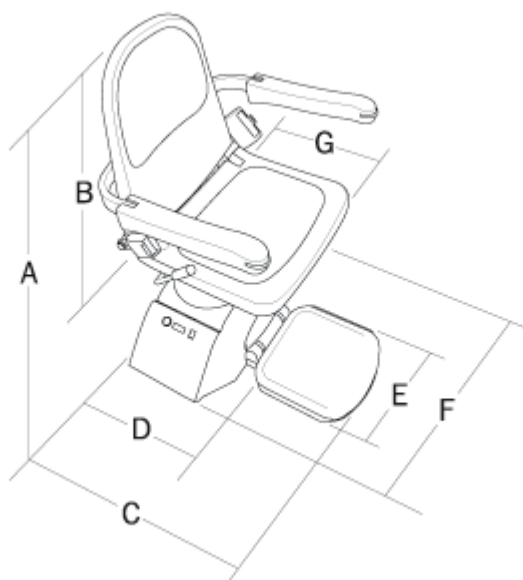

### Dimensioni in mm

A	1020
B	495
C	585
D	325
E	305
F	560
G	410

### Caratteristiche Tecniche

Potenza motrice	0.25 kW
Potenza del motore	22 rpm
Metodo di trasmissione	Cremagliera e Perno
Potenza coppia motore	108 Nm
Potenza alimentazione elettrica	Batteria da 24 v cc
Capacità massima	127kg
Il binario	in alluminio estruso anodizzato
Alimentazione di rete	240 v, 50 Hz caricabatteria

V&B Home Comfort, in conformità alla propria strategia di continuo sviluppo, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso. Tutte le misure riportate sono approssimative.